

Wat u ziet.

Wat u hoort.

Wat u moet doen.

Mogelijke berichten op het LCD-scherm:

Tekstberichten
Teller voor schokken
Verstreken tijd
ECG-pulsgolf

Begin hier.

Persoon zakt in elkaar-vermoedelijke hartstilstand.

Apparaat OK.

Zet het apparaat aan.

Zelftest. Apparaat OK.

Apparaat geschikt voor de behandeling van volwassen patiënten en kinderen.

Andere mogelijke stemmeldingen:

Sluit de kabel aan.

Test unit mislukt.

Laat de schokknop los.

Verwissel de batterijen.

(n) schokken.

Wat u moet doen:

Plaats de elektrodekabel.

Zet het apparaat uit en weer aan.

Als de test weer mislukt, start u met reanimatie.

Laat de schokknop los.

Vervang alle 10 batterijen.

Indicator knippert.

Start de reanimatie.

Reanimeer als volgt: 2 ademhalingen bij elke 30 compressies.

Na één schok...

Indicator knippert.

Schok geadviseerd.

Raak de patiënt niet aan. Druk op de knipperende schokknop.

Zorg dat iedereen afstand neemt.

Raak de patiënt NIET aan! Druk op de knop.

Er is een schok toegediend.

Na 2 minuten reanimatie...

Stop met de reanimatie.

Indicator knippert.

Raak de patiënt niet aan, de analyse wordt uitgevoerd.

Geen schok geadviseerd.

Indicator knippert.

Controleer het bewustzijn.

Roep: "Gaat het?" terwijl u de persoon zachtjes heen en weer schudt.

Blijf rustig.

Indicator knippert.

Vraag om hulp.

Haal hulp of vraag iemand anders dit te doen.

Indicator knippert.

Open de luchtweg.

Til de kin omhoog en kantel het hoofd achterwaarts.

Optie: plaats het deksel onder de schouders om het hoofd te kantelen. Doe dit NIET als u hoofd- of nekletsel vermoedt.

Als de patiënt niet reageert, opent u de ademweg.



Indicator knippert.

Controleer de ademhaling. En geef 2 beademingen.

Controleer de ademhaling. Controleer of de borst op en neer beweegt. Controleer of u de uitademing hoort. Controleer of u de uitademing voelt. Controleer of de patiënt normaal ademt, kucht of beweegt.

Als de patiënt niet ademt, **geeft u 2 beademingen** (1 seconde per keer) (uitsluitend AHA-richtlijnen 2005).

Indicator knippert.

Bevestig de elektroden op de onblote borstkas van de patiënt.

Breng elektroden voor volwassenen of zuigelingen/kinderen aan op de blote borst van de patiënt. Volg de aanwijzingen op de elektrodeverpakking.

Plaats de elektroden op de aangegeven wijze bij patiënten die jonger zijn dan 8 jaar of minder wegen dan 25 kg.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

- Bij patiënten met vermoedelijke circulatiestilstand, te herkennen aan:
- Bewusteloosheid en
 - Ademhalingsstoornis en
 - Ontbreken van pols of bloedsomloop.

Als een slachtoffer jonger is dan 8 jaar of minder weegt dan 25 kg, moeten ZOLL AED Plus-elektroden voor kinderen worden gebruikt op de ZOLL AED Plus. Stel de behandeling niet uit om de exacte leeftijd of het exacte gewicht van de patiënt vast te stellen.

CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK

- NIET gebruiken wanneer de patiënt:
- Bij bewustzijn is of
 - Ademt of
 - Een voelbare pols of andere tekenen van een bloedsomloop heeft.

DOELGROEP

De externe defibrillator ZOLL AED PLUS mag worden gebruikt voor defibrillatie bij slachtoffers van een hartstilstand door personen die zijn opgeleid om te werken met de AED PLUS en cursussen hebben gevolgd op het gebied van (geavanceerd) reanimeren, of andere cursussen hebben gevolgd voor medisch handelen onder toezicht van een arts. De CPR-bewakingsfunctie is voorzien van een metronoom, die de hulpverlener instrueert bij het uitvoeren van hartmassage met een frequentie van 100 compressies per minuut, zoals aanbevolen door AHA/ERC. Gesproken berichten en berichten op het LCD-scherm bieden aanwijzingen voor compressie met een diepte van 3,8 tot 5,1 cm bij volwassenen. De CPR-bewakingsfunctie is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten die jonger zijn dan 8 jaar.

ZOLL.
Advancing Resuscitation. Today.™

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
+1 978-421-9655 • +1 800-348-9011
www.zoll.com